
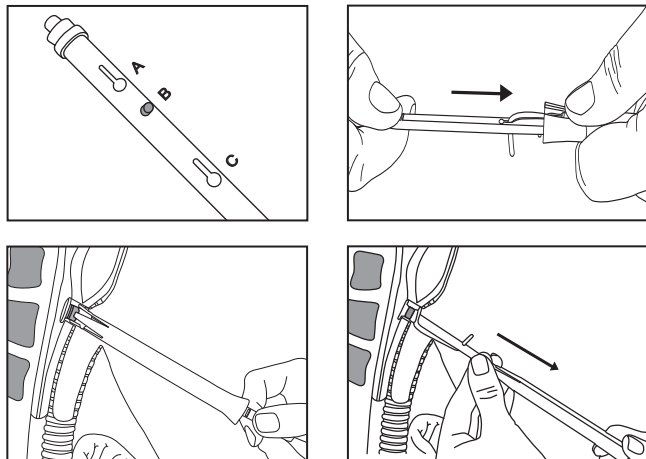


# LARYVOX® INSERTER

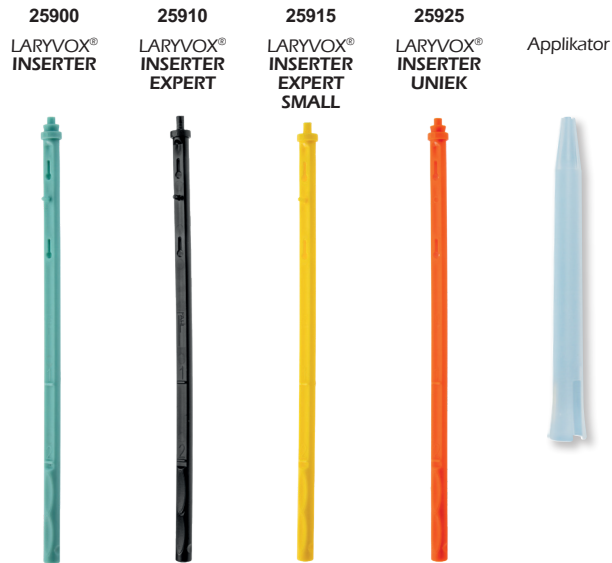

- ▶ Der **LARYVOX® INSERTER** besteht aus einem Platzierungsinstrument sowie einem Applikator. Er dient einer optimalen anterograden Platzierung bzw. dem Wechsel einer Stimmprothese:
  - **REF 25900:** für Stimmprothesen mit 5-14 mm Schaftlänge
  - **REF 25910:** für 16 Fr. Stimmprothese und/oder eines **Blom-Singer® DUAL VALVE** Shunt-Ventils (20 Fr.)
  - **REF 25915:** für Stimmprothesen mit einer Schaftlänge von 4 mm
  - **REF 25925:** für **LARYVOX® UNIEK** Stimmprothese
- ▶ Das Platzierungsinstrument verfügt über zwei (**REF 25925**) bzw. drei unterschiedliche Fixierungsmöglichkeiten um verschiedene Stimmprothesen-Typen einfach und sicher zu platzieren.
- ▶ Der Applikator ermöglicht ein müheloses Einführen der Stimmprothese und ist in wenigen Schritten vorbereitet.
- ▶ Die abgerundete Applikator-Spitze fördert zudem eine sanfte Platzierung und macht den Stimmprothesen-Wechsel so angenehm wie möglich.

## LIEFERUMFANG

- ▶ Applikator
- ▶ Gebrauchsanweisung

**LARYVOX® INSERTER** REF 25900  
1 x Platzierungsinstrument (türkis)

oder  
**LARYVOX® INSERTER EXPERT** REF 25910  
1 x Platzierungsinstrument (schwarz)

oder  
**LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL** REF 25915  
1 x Platzierungsinstrument (gelb)

Stimmprothese nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Bitte Gebrauchsanleitung des jeweiligen Stimmprothesen-Herstellers beachten!

Die Sets der Stimmprothese **LARYVOX® UNIEK** (**REF 25010 und 25020**) enthalten den:

**LARYVOX® INSERTER UNIEK** REF 25925  
1 x Platzierungsinstrument (orange)

Produkt	VE	REF
<b>LARYVOX® INSERTER</b>	1 Stück	<b>25900</b>
<b>LARYVOX® INSERTER EXPERT</b>	1 Stück	<b>25910</b>
<b>LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL</b>	1 Stück	<b>25915</b>
<b>LARYVOX® INSERTER UNIEK</b>	1 Stück	<b>25925</b>



Die Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ist exklusiver Vertriebspartner für Blom-Singer®-Produkte in ausgewählten Ländern Europas. Blom-Singer® ist eine eingetragene Marke der Freudenberg Medical, LLC.







# LARYVOX® INSERTER

25920  
LARYVOX®  
INSERTER  
SPECIAL



Gel-Kapseln

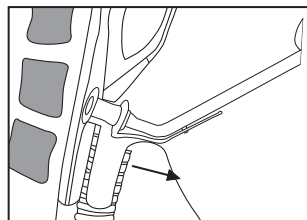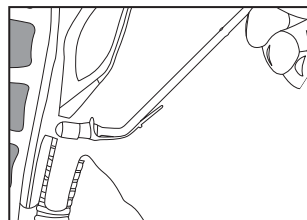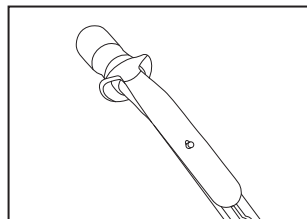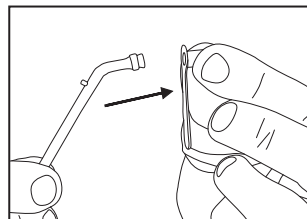

- ▶ **LARYVOX® INSERTER SPECIAL** dient der optimalen anterograden Platzierung bzw. dem Wechsel einer Stimmprothese durch Anwendung der Gel-Kapsel-technik bei:
  - tiefpositionierten oder schräg verlaufendem Shunt
  - bei verengtem Shuntkanal
  - bei besonders kleinem Tracheostoma zur Optimierung der Sichtverhältnisse
- ▶ Das Platzierungsinstrument verfügt über eine sichere Fixierungsmöglichkeit um verschiedene Stimmprothesen-Typen mit einem Durchmesser von 20 French ab 5 mm Länge einfach und sicher zu platzieren
- ▶ Durch die Anwendung der Gel-Kapsel-Technik wird ein müheloses Einführen der Stimmprothese ermöglicht
- ▶ Mit Hilfe der Gelkapsel wird die Stimmprothese atraumatisch in den Shuntkanal eingeführt
- ▶ Unmittelbar vor der Platzierung kann ein Tropfen wasserlösliches Lokalanästhetikum aufgetragen werden, um die Auflösung der Gelkapsel im Ösophagus zu beschleunigen
- ▶ Die passenden Gelkapseln sind in den Größen 20 Fr. und 22 Fr. separat erhältlich

## LIEFERUMFANG

- ▶ Gebrauchsanweisung

**LARYVOX® INSERTER SPECIAL** REF 25920  
1 x Platzierungsinstrument (blau)

Optionales Zubehör:  
**BLOM-SINGER® REPLACEMENT GEL CAPS** REF BE3X9X  
Ersatzgelkapseln

Stimmprothese nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Bitte Gebrauchsanleitung des jeweiligen Stimmprothesen-Herstellers beachten!

Produkt	VE	REF
LARYVOX® INSERTER SPECIAL	1 Stück	25920













Die Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ist exklusiver Vertriebspartner für Blom-Singer®-Produkte in ausgewählten Ländern Europas. Blom-Singer® ist eine eingetragene Marke der Freudenberg Medical, LLC.










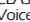
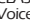
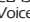
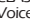
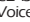

















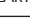

















# LARYVOX® INSERTER

## ZUORDNUNG

25900	25910	25915	25920	25925
LARYVOX® INSERTER	LARYVOX® INSERTER EXPERT	LARYVOX® INSERTER EXPERT SMALL	LARYVOX® INSERTER SPECIAL	LARYVOX® INSERTER UNIEK
Farbe				
				
				

Achten Sie vorher auf die Länge (xx) der einzusetzenden Stimmprothese.

REF	Bezeichnung	Länge	INSERTER
20 FRENCH			
AD20xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
AD2004-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
AS20xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
AS2004-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
DV20xx-LF	DUAL VALVE Indwelling LF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
DV20xx-NS	DUAL VALVE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN2004-NS	CLASSIC Indwelling 4 mm 20 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-NS	CLASSIC Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-20 mm	
IN2004-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 4 mm 20 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-IR	CLASSIC Indwelling IR 20 Fr. Voice Prosthesis	06-12 mm	
IN2004-LEIR	CLASSIC Indwelling LEIR 20 Fr. 4 mm Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-LEIR	CLASSIC Indwelling LEIR 20 Fr. Voice Prosthesis	06-08 mm	
IN20xx-LESL	CLASSIC Indwelling LESL 20 Fr. Voice Prosthesis	05 und 07 mm	
IN2004-LETO	TEP Occluder Indw. LETO 20 Fr. 4 mm Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-LETO	TEP Occluder Indw. LETO 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN2004-LF	CLASSIC Indwelling LF 20 Fr. 4 mm Voice Prosthesis	04 mm	
IN20xx-LF	CLASSIC Indwelling LF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-SL	CLASSIC Indwelling SL 20 Fr. Voice Prosthesis	05,07 und 09 mm	
IN20xx-SO	CLASSIC Indwelling STERIL 20 Fr. Voice Prosthesis	08-14 mm	
25020-xx	LARYVOX® Uniek U.L.R.	05-13 mm	
25010-xx	LARYVOX® Uniek U.L.R.	05-13 mm	

REF	Bezeichnung	Länge	INSERTER
16 FRENCH			
AS1604-NS	ADVANTAGE Indwelling 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
AS16xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 16 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN1604-NS	CLASSIC Indwelling 4 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN16xx-NS	CLASSIC Indwelling 6 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	06-20 mm	
IN16xx-SO	CLASSIC Indwelling STERIL 10 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	08-14 mm	
IN16xx-IR	CLASSIC Indwelling IR 16 Fr. Voice Prosthesis	06-12 mm	
IN1604-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 4 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN16xx-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 16 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN16xx-LESL	CLASSIC Indwelling LESL 16 Fr. Voice Prosthesis	05 und 07 mm	
IN1604-LETO	CLASSIC Indwelling LETO 4 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN16xx-LETO	CLASSIC Indwelling LETO 16 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN1604-LF	CLASSIC Indwelling LF 4 mm 16 Fr. Voice Prosthesis	04 mm	
IN16xx-LF	CLASSIC Indwelling LF 16 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN16xx-SL	CLASSIC Indwelling SL 16 Fr. Voice Prosthesis	05,07 und 09 mm	
IN16xx-SO	CLASSIC Indwelling STERIL 16 Fr. Voice Prosthesis	08-14 mm	
Einsatz mit Gel-Kapsel-Technik			
IN20xx-NS	CLASSIC Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-20 mm	
AD20xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
AS20xx-NS	ADVANTAGE Indwelling 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-LF	CLASSIC Indwelling LF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-LEF	CLASSIC Indwelling LEF 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	
IN20xx-SL	CLASSIC Indwelling SL 20 Fr. Voice Prosthesis	05,07 und 09 mm	
IN20xx-LEIR	CLASSIC Indwelling LEIR 20 Fr. Voice Prosthesis	05 und 07 mm	
IN20xx-LESL	CLASSIC Indwelling LESL 20 Fr. Voice Prosthesis	05 und 07 mm	
IN20xx-IR	CLASSIC Indwelling IR 20 Fr. Voice Prosthesis	06-12 mm	
IN20xx-LETO	TEP Occluder Indw. LETO 20 Fr. Voice Prosthesis	06-14 mm	



Die Andreas Fahl Medizintechnik-Vertrieb GmbH ist exklusiver Vertriebspartner für Blom-Singer®-Produkte in ausgewählten Ländern Europas. Blom-Singer® ist eine eingetragene Marke der Freudenberg Medical, LLC.